

HERZmed Sofort-Kälte-Kompressenen



HERZmed Kälte-Sofortkomresse

Unsere HERZmed Kühlkompressen dienen zur schnellen und einfachen Kühlung von Prellungen, Hämatomen und Frakturen und sind ebenfalls Bestandteil in jedem First Responder Rucksack.

Die neue HERZmed Kälte-Sofortkomresse ist hervorragend für alle Bereiche geeignet, wo eine schnelle Kühlung notwendig ist. Der Innenbeutel wird durch festes Drücken zum Platzen gebracht. Durch Vermischen der beiden Grundsubstanzen erfolgt innerhalb von Sekunden die Kälte-Aktivierung. Das Produkt ist nur für den Einmalgebrauch geeignet.

Die neue HERZmed Kälte-Sofortkomresse ist aus Nonwoven Material. Hier handelt sich um ein Vliesmaterial, das aus synthetischen Polymerfasern (z. B. Polypropylen, Polyester oder Polyamid) besteht, die thermisch, chemisch oder mechanisch miteinander verfestigt werden – ohne gewebt oder gestrickt zu sein.

Dieses Material wird häufig im medizinischen Bereich verwendet (z. B. für Einweg-OP-Mäntel, Verpackungen, Schutzmasken oder sterile Abdeckungen).

Anwendung



Hautfreundlicher und angenehmer im Kontakt



Aus Nonwoven Material.
Verhindert „Kältebrenneffekt“.

Die Einweg-Sofort-Kältekomresse bietet zuverlässige, schnelle Kälte zur Akutbehandlung bei Verletzungen und Entzündungen.
Aktivierung durch Druck, sofort einsatzbereit – ideal für Arztpraxis, Klinik oder Erste-Hilfe-Sets.



Bei Bedarf einfach den Beutel zusammendrücken und den Innenbeutel zum Platzen bringen.
Danach heftig schütteln, damit sich der Inhalt vermischt.
Die Kälte-Sofortkomresse bietet schnelle und effektive Schmerzlinderung genau dort, wo Sie sie benötigen.
Danach im Hausmüll entsorgen.

Hautfreundliches Nonwoven TNT-Material

Nonwoven ist ein Vliesmaterial, das aus synthetischen Polymerfasern (z. B. Polypropylen, Polyester oder Polyamid) besteht.

Eigenschaften:

- atmungsaktiv
- Weich, textilähnlich, angenehm auf der Haut
- Lässt Luft und minimale Feuchtigkeit diffundieren – geringere Kondensatbildung
- Hohe Reißfestigkeit trotz geringem Gewicht
- Bakterien- und Schmutzabweisend, kann mit antimikrobieller Ausrüstung versehen werden
- Weich, nicht klebend, angenehm auch bei direktem Hautkontakt
- Geringe Wärmeleitfähigkeit – wirkt als dünne Isolationsschicht, verhindert „Kältebrenneffekt“

Hygienisch und Sauber

Bakterien- und Schmutzabweisend

Einfache und schnelle Anwendung der HERZmed Sofort-Kältekompressen

Kälte in Sekundenschnelle – einfach aktivieren und anwenden.

Medizinisch-professionell (für Klinik- oder Praxisbedarf)

zuverlässige, schnelle Kälte zur Akutbehandlung bei Verletzungen und Entzündungen – ideal für Arztpraxis, Klinik oder Erste-Hilfe-Sets.

Einzelverpackung

Schneller und sauberer Einsatz. Einzeln verpackt.



Maße

Größe: ca. 15 x 21 cm

Vorteile von TNT gegenüber PE bei Kältekompressen

- Hautfreundlicher und angenehmer im Kontakt – kein „Plastikgefühl“ auf der Haut.
- Reduziert Kondenswasserbildung durch Mikroporen – dadurch weniger Feuchtigkeit auf der Oberfläche.
- Verbessert die Kälteverteilung: TNT wirkt als sanfter Diffusionsfilter, wodurch die Kälte gleichmäßiger abgegeben wird.
- Verringert das Risiko von Kälteverletzungen (kein direkter Kontakt von Eisbeutel zu Haut).
- Hygienischer – schmutzabweisend, kann keimhemmend ausgerüstet werden.
- Nachhaltiger – je nach Zusammensetzung recyclingfähig und ressourcenschonender als dickwandige PE-Folie.

Technische Spezifikationen

Größe:

ca. 15 x 21 cm

Gewicht:

ca. 900 g

Farbgebung:

Blau

Verpackung/VPE:

Stück einzeln verpackt
Karton = 36 Stück

Lagerung: Trocken aufbewahren

Entsorgung: im normalen Hausmüll

Material:

1. Vlies (nonwoven)

Sterilität: Nein


Einmalprodukt: Ja

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Beschreibung	Gramm
200060	HERZmed Sofort-Kälte-Kompresse	ca. 900 gr.

GTIN sekundäre Verpackung/Karton (36 Stück): 4251697700674

Bestellung und Beratung durch:

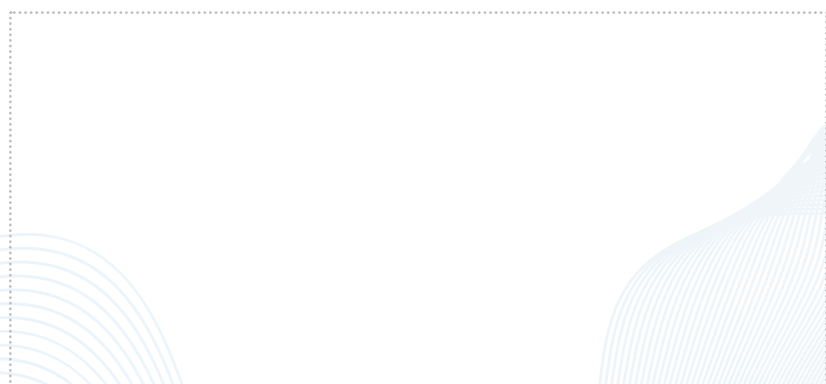

Vertrieb/Sales Office:
HERZmed GmbH
Rottenbucher Straße 9
82497 Unterammergau

Tel.: +49 (0) 8822 824 0002
Fax: +49 (0) 8822 824 0006
Mail: herzmed@herzmed.de
Web: www.herzmed.com

Verwaltung/Managment:
HERZmed GmbH
Herkulan-Schwaiger-Gasse 16
82487 Oberammergau

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.herzmed.de. Alle mit einem Stern gekennzeichneten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter: www.herzmed.de einsehen können.

